

NORMA UNE 0065/2020  
NORMA UNE -EN14683:2019  
+ AC2019

# MASCARILLAS HIGIENICAS REUTILIZABLES

FABRICADAS EN ESPAÑA

**ff** fama fabré





**Mascarillas Higienicas Reutilizables fabricadas en  
Poliester 100% Hidrofugado y antibacterial  
Fabricadas según norma UNE0065:2020  
Eficacia en la filtración de aerosoles**

**>96%**

**Eficacia de filtración de particulas.**

**>93%**

**Pruebas realizadas según norma  
UNE-EN14683:2019+AC2019**

**Garantiza la protección contra aerosoles sólidos y  
liquidos.**

**Garantiza una hermeticidad adecuada frente a la  
atmosfera ambiental.**





## INSTRUCCIONES DE USO



### **La mascarilla es de uso personal e intransferible**

1. Lavar la mascarilla en la lavadora antes de utilizarla por primera vez
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
3. Identificar la parte superior de la mascarilla.
4. Posicionarla en la cara, a la altura de la nariz.
5. Sostenerla desde el exterior y pasar las gomas por detrás de las orejas, sin cruzarlas.
6. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla y cubrirla completamente.
7. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.
8. No tocar la mascarilla con las manos una vez haya sido ajustada. Si se necesita tocarla, se debe lavar las manos con agua y jabón o frotárselas previamente con una solución hidroalcohólica.
9. Las mascarillas para niños deben ser colocadas, usadas y retiradas bajo supervisión de un adulto.

### **Retirada de la mascarilla**

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
2. Retirar la mascarilla sin tocar su parte frontal.
3. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Se debe realizar un ciclo completo de lavado a una temperatura de 60°C.

A la hora de lavar la mascarilla se debe evitar el contacto entre una mascarilla sucia y la ropa limpia. La persona encargada del lavado debe protegerse correctamente para manejar las mascarillas sucias. No se deben utilizar productos que puedan dañar o degradar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora.

Se recomienda que la mascarilla se seque completamente dentro de las 2 horas posteriores al lavado. No se debe secar o higienizar con un horno microondas.

Tanto durante el secado, como en el almacenaje posterior de la mascarilla, se deben evitar los ambientes en los que la mascarilla se pueda volver a contaminar.

Después de cada ciclo de lavado, se debe realizar una inspección visual (con las manos lavadas o guantes de protección). Si se detecta algún daño en la mascarilla (menor ajuste, desgaste, deformación, etc.) debe desecharse.





## Duración de uso máximo continuado

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4 horas. En caso de que se deteriore o humedezca por el uso, se recomienda sustituirla por otra.

La mascarilla se debe lavar cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.

## Procedimiento para desechar la mascarilla

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se advierte que una vez sobrepasado los 50 lavados se debe desechar.

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de plástico. Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa en caso de desgarramiento de la bolsa exterior. Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.



### TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN



No lejía



No en seco

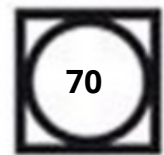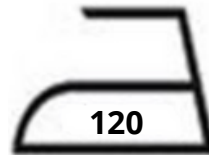

**Mascarilla Higiénica Reutilizable**

**FAMA FABRÉ SA**

**UNE 0065-2020**

**ADVERTENCIA: Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425”.**

**La mascarilla no exime al usuario de la aplicación de gestos barrera complementados por las medidas de distanciamiento social que son esenciales.**

